

Acerin, plastry na odciski, 6 sztuk



cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plastry
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	wyrób medyczny
Zastosowanie	akcesoria sportowe

Opis produktu

Czym są plastry na odciski Acerin?

Acerin plastry na odciski z centralnym dyskiem wykonanym z pianki polietylenowej działają wygładzająco i ochronnie. Dodatkowo zmiękczają skórę, dzięki czemu zapewniają szybkie i bezbolesne usunięcie nagniotka. Dodatkowo piankowy dysk zabezpiecza odcisk przed tarciem i uciskiem.

Wskazaniem do stosowania plastrów na odciski jest wspomaganie leczenia nagniotków (odcisków).

Kleje topliwe z siatki UV-C, opracowane w najnowocześniejszej technologii. Nie zawiera rozpuszczalników. Optymalne działanie w każdych warunkach środowiskowych.

Skład

Zawiera 35-40% kwasu salicylowego.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem należy dokładnie oczyścić i osuszyć leczony obszar, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie i działanie plastra. Zdjąć zabezpieczenie ochronne i umieścić plaster tak, aby odcisk znalazł się centralnie pod nim.

Codziennie zmieniać plaster na nowy.

Przeciwwskazania

Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Nie stosować w przypadku zaczerwienienia, objawów zapalenia lub zranienia skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie natychmiast przerwać leczenie.

Pacjenci z cukrzycą i/lub problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz dzieci do 16 roku życia przed zastosowaniem plastrów powinni skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego, do leczenia odcisków.



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie.
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy powiadomić wytwórcę i właściwe władze.
Zawartość:

6 plastrów o wymiarach 72 mm x 19 mm.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: DOC*