

Corega tabs Bio Formula 136 tabletek czyszczenie protez



cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	136 tabletek
Postać	tabletki musujące
Producent	glaxosmithkline
Rejestracja	wyrób medyczny
Substancja czynna	złożone
Zastosowanie	Klej do protez

Opis produktu

Opis

Tabletki Corega Tabs Bio Formula, dzięki formule czyszczącej „micro clean”, znacznie skuteczniej niszczą szkodliwe bakterie i grzyby znajdujące się na protezie niż zwykła pasta do zębów.

Tabletki Corega Tabs Bio Formula zabijają 99,9% bakterii, które są główną przyczyną nieświeżego oddechu.

Corega Tabs:

Działają przeciwbakteryjnie

Pomagają zapobiec gromadzeniu się płytki bakteryjnej, która wywołuje podrażnienie dziąseł

Czyszczą protezę w 15 minut

Można je stosować do czyszczenia protez całkowitych i częściowych.

Sposób użycia

Wrzuć jedną tabletkę Corega do naczynia z ciepłą (nie gorącą) wodą. Ilość wody powinna wystarczyć do całkowitego zanurzenia całej protezy na czas podany w instrukcji na opakowaniu.

Po zanurzeniu w roztworze tabletek na 3-5 minut, wyczyść protezę zębową szczoteczką z użyciem roztworu.

Dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą. Wylej pozostały roztwór natychmiast po użyciu.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Po rozpuszczeniu, tabletki czyszczące w formie roztworu powinno się stosować do namoczenia protezy przez czas podany na opakowaniu. Zużyty roztwór czyszczący należy wylać po jednokrotnym użyciu.

Zawartość:



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

Opakowanie zawiera 136 tabletek.
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BLOCK DRUG

Pozwolenie: PZH