

Kompresy niejałowe z gazy 5 cm x 5 cm, 100 sztuk



cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	100 sztuk
Postać	kompresy
Producent	Synoptis
Rejestracja	wyrób medyczny
Zastosowanie	Odkażanie

Opis produktu

Opis

Kompresy po wyjąłowaniu przeznaczone są do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków.

Kompresy z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe.

Skład

Kompresy z gazy 17-nitkowej, 100% bawełny.

Sposób użycia

Kompresów nie należy stosować w polu operacyjnym. Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną wg normy EN-ISO 17665-1. W celu sterylizacji wyrób należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzić w sterylizatorach parowych w temperaturze 121 °C – czas ekspozycji 20 minut, lub w temperaturze 134 °C – czas ekspozycji 10 minut.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

100 sztuk



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: P.P.H.DALPEX WROCLAW

Pozwolenie: DOC*