

Viscoplast Poloderm, plastry na odciski, 6 sztuk stopy

cena: 14,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	1 dzień roboczy
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plastry
Producent	3M
Rejestracja	wyrób medyczny
Zastosowanie	Pielęgnacja

Opis produktu

Opis

Viscoplast Poloderm plastry na odciski z kwasem salicylowym polecany jest do usuwania odcisków. Plaster Viscoplast Poloderm posiada miękki pierścień, który umożliwia ochronę odcisków i nagniotków.

Działanie

Zawarta w pierścieniu masa z kwasem salicylowym zmiękcza zrogowaciałą skórę i ułatwia jej usuwanie.

Skład

Kwas salicylowy, kwas mlekowy.

Sposób użycia

Na czystą i suchą stopę nałożyć plaster Viscoplast Poloderm tak, aby substancja czynna przylegała do odcisku.

Stosować plastry do momentu aż odcisk zostanie usunięty.

Każdy plaster należy nałożyć na ok. 24 godziny.

Po zakończeniu kuracji można usunąć środkową część odcisku stosując ciepłą kąpiel stóp z użyciem soli i mydła.

Jeżeli w trakcie zabiegów skóra stanie się wrażliwa i pojawi się zaczerwienienie, poczekać z nałożeniem kolejnych plastrów.

Przeciwwskazania

Nie stosować plastrów Viscoplast Poloderm przy uczuleniu na salicylany lub inny składnik.

Nie stosować przy infekcji odcisków.

Chronić przed dziećmi.

Produkt zawiera substancję silnie drażniącą.

Należy stosować wyłącznie na odcisk.

Wyrób może wywołać reakcje uczuleniowe lub podrażnienie w przypadku nałożenia na zdrową skórę.

Zaprzestać stosowania w razie wystąpienia bólu.

Chorzy na cukrzycę, neuropatię i z zaburzeniami układu krążenia przed zastosowaniem powinni zasięgnąć opinii lekarza. J

Jeśli po dwóch tygodniach stosowania plastra Viscoplast Poloderm leczenie nie przynosi oczekiwanego efektu, należy skonsultować się z lekarzem.



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: 3M

Pozwolenie: DOC*

Kod EAN: 5901448250796