

Zestaw plastrów z opatrunkiem Viscoplast Tamujący krwawienie 14 sztuk

cena: 14,99 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	14 sztuk
Postać	plastry
Producent	3M
Rejestracja	wyrób medyczny
Zastosowanie	Pielęgnacja

Opis produktu

Opis

Plastry tamujące krwawienie Viscoplast nadają się przede wszystkim do naklejania na drobne skaleczenia, zadrapania bądź małe uszkodzenia na powierzchni skóry. 3M Viscoplast można nałożyć chociażby na palec po zacięciu się nożem czy na brodę po skaleczeniu maszynką do golenia.

Oksyceluloza znajdująca się w warstwie kontaktowej ze skórą wytwarza specjalny żel – powłokę, zapobiegający dalszemu krwawieniu. Plaster z opatrunkiem rewelacyjnie wchłania krew i wydzielinę, przyspieszając gojenie. Plastry Viscoplast doskonale osłaniają ranę przed bakteriami i zabrudzeniami, powodując że rana ładnie się zasklepi.

Sposób użycia

Otworzyć opakowanie i wyjąć plaster. Usunąć papierową warstwę zabezpieczającą. Dokładnie delikatnie docisnąć miejsce z klejem do skóry wokół rany. Plaster należy przyklejać na zdezynfekowaną i suchą skórę.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Należy unikać kontaktu proszku z oczami. Ranę należy zdezynfekować przed nałożeniem plastra.

Uwagi do stosowania

Plaster nie jest przeznaczony do tamowania krwawień: tętnicznych, żylnych, z dużych naczyń krwionośnych. W przypadku obfitych krwawień wskazana jest konsultacja medyczna.

Zawartość:

W zestawie znajdują się plastry na podłożu włókninowym, są miękkie i delikatne, pozwalają skórze oddychać oraz mogą długo pozostawać na skórze.



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

W opakowaniu znajdziemy trzy różne wymiary plastrów: 22,5 mm - 2 sztuki; 57 mm x 16 mm - 6 sztuk; 72 mm x 19 mm - 6 sztuk.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: 3M